



# आइये जाने थर्मामीटर पढ़ना

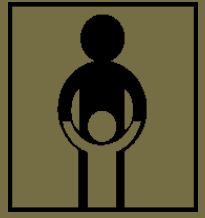

- ✓ प्रत्येक आई.एल.आर. एवं डीप फ्रीज़र के भीतर थर्मामीटर अवश्य रखें।
- ✓ थर्मामीटर उपकरण के बीच में टांग कर रखें, जिससे यह वैक्सीन के डिब्बों तथा दीवारों के संपर्क में न आए।
- ✓ प्रत्येक दिन में दो बार (सुबह एवं शाम) थर्मामीटर से भीतर के तापमान की जांच अवश्य करें।
- ✓ थर्मामीटर उपकरण के भीतर ही यथास्थिति में पढ़ें तथा इसे पढ़ने हेतु बाहर न निकालें। इसे ज्यादा देर हाथ में भी न रखें।
- ✓ यदि उपकरण का तापमान उपयुक्त सीमा से कम अथवा अधिक हो तो उसे ठीक करने हेतु तुरंत कार्यवाही करें।
- ✓ थर्मामीटर के टूट जाने पर उसे तुरंत बदल दें।

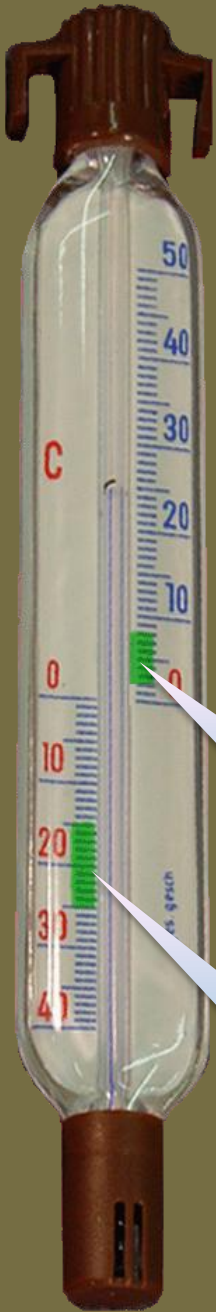

आई.एल.आर.  
 +2 से +8  
 डिग्री सेंटीग्रेड

डीप फ्रीज़र  
 -15 से -25  
 डिग्री सेंटीग्रेड

